


Aktualizovaný postup měření s kontrolním vzorkem na přístroji Xprecia


1. Před použitím plazmu promíchejte otočením plastové lahvičky tam a zpět 10krát.

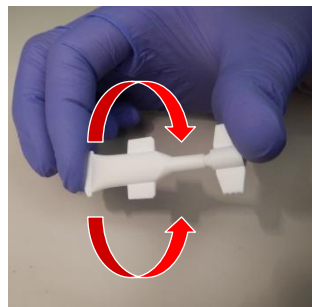


2. Otočením víčka podle obrázku otevřete lahvičku.



3. Stlačením kapátka aplikujte kontrolní vzorek na proužek.
Kapka se nanáší shora na oblast půlkruhu! Nepřikládejte kapátko ze strany čipu.

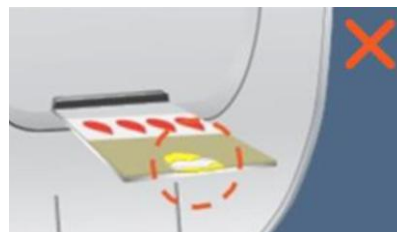

4. Uzavřete lahvičku zatlačením víčka zpět na hrdlo.

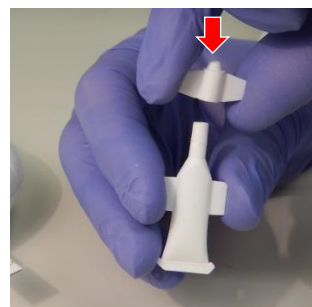

5. Utěsněná lahvička se skladuje při teplotě 2-8 ° C a může být použita znovu do 48 hodin

