

Externí hodnocení kvality

Hemoglobin A1c, cyklus 2, 2022

Vítejte v kontrolním cyklu EHK Labquality **Hemoglobin A1c, cyklus 2, 2022**.
Cyklus 1262 je určen pro POCT přístroje.

Vzorky

Kontrolní vzorky **S001** a **S002** jsou **čerstvá lidská krev**. Objem vzorků je 0,5 ml.
Vzorky jsou připraveny k použití.



Návod k použití

Kontrolní vzorky čerstvé lidské krve S001 a S002 analyzujte ihned po jejich příchodu stejným způsobem jak patientské vzorky. Pokud nemůžete analyzovat vzorky v den doručení, uskladněte je v lednici a analyzujte je co nejdříve jak je to možné. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorky z lednice a nechte je vytemperovat na pokojovou teplotu. Krev před analýzou promíchejte jemným otáčením lahvičky asi 10krát. **Netřepat!** Kontrolní vzorky **po analýze nevyhazujte**, ponechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu!

Upozornění

V kontrolních materiálech bylo licenčními činidly prokázáno, že neobsahují protilátky proti HIV ani HbsAg. Žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

Výsledky

Výsledkový protokol můžete zaslat on-line anebo e-mailem.

Pro **on-line** protokol klepnete zde: <https://bit.ly/HbA1c222online>

Pro **email** protokol klepnete zde: <https://bit.ly/HbA1c-email>

Protokoly zaslané poštou nepřijímáme!

2022-04-04

POKYNY

Produkt č.: 1260, **1262**
LQ729421051-052/FI
Subdodávka: vzorky

Kontrolní sada obsahuje

- 2 kontrolní vzorky
- Instrukce
- Výsledkový formulář

Zkontrolujte zásilku.
Pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, ihned informujte Labquality nebo vašeho distributora.

Lhůta pro zaslání
výsledků:

15. 04. 2022

Dotazy

Labquality koordinátor
Päivi Ranta
+358 9 8566 8226
paivi.ranta@labquality.fi

Konzultant pro ČR
Jan Balla
jan.balla@manacon.sk

Labquality
Kumpulantie 15
FI-00520 HELSINKI
info@labquality.fi
www.labquality.fi

Telefon: +358 9 8566 8200
Fax: +358 9 8566 8280

