

Hemoglobin A1c, cyklus 2, 2024

Vítejte v kontrolním cyklu EHK Labquality **Hemoglobin A1c, cyklus 2, 2024**.
Cyklus 1262 je určen pro POCT přístroje.

Vzorky


Kontrolní vzorky **S001** a **S002** jsou **čerstvá lidská krev**. Objem vzorků je 0,5 ml.
Vzorky jsou připraveny k použití.



Návod k použití

Kontrolní vzorky čerstvé lidské krve S001 a S002 analyzujte ihned po jejich příchodu stejným způsobem jak patientské vzorky. Pokud je ze závažných

důvodů nemůžete analyzovat vzorky v den doručení, uskladněte je v lednici a analyzujte je co nejdříve. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorky z lednice a nechte je alespoň 30 min vytemperovat na pokojovou teplotu. Krev před analýzou promíchejte jemným otáčením lahvičky asi 10krát. **Netřepat!** Poté ukazováčkem poklepejte na víčko nádoby, aby tekutina zachycená na uzávěru skla na dno. Otevřete nádobku a dále postupujte podle pracovního návodu výrobce vašeho přístroje. Kontrolní vzorky **po analýze nevyhazujte**, ponechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu!

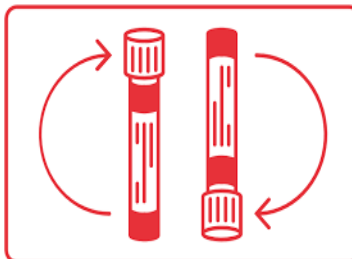

Upozornění

V kontrolních materiálech bylo licenčními činidly prokázáno, že neobsahují protilátky proti HIV ani HbsAg. Žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

Výsledky

Výsledkový protokol můžete zaslat on-line anebo e-mailem.

Protokoly zaslané poštou nepřijímáme!

2024-04-15

POKYNY

Produkt č.: 1260, 1262

LQ729423061-062/FI
Subdodávka: příprava vzorků

Kontrolní sada obsahuje

- 2 kontrolní vzorky
- Instrukce
- Výsledkový formulář

Zkontrolujte zásilku.
Pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, ihned informujte Labquality nebo vašeho distributora.

Lhůta pro zaslání
výsledků:

26. 04. 2024

Dotazy

Labquality koordinátor
Päivi Ranta
paivi.ranta@labquality.fi

Labquality
Kumpulantie 15
FI-00520 HELSINKI
Finland

Tel. + 358 9 8566 8200
info@labquality.fi
www.labquality.fi

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality, který vytvořil Ján Balla. Odpovědnost společnosti Labquality je omezená na původní anglický dopis s pokyny, které jsou vám odeslány notifikačním emailem spolu s ostatními pokyny. Za správnost překladu odpovídá autor.

Jan Balla
jan.ball@manacon.sk