

Externí hodnocení kvality

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici

Cyklus 2, 2025

Produkt č. 2749
LQ747725021-022/DE

Zkontrolujte zásilku při převzetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, okamžitě nás informujte a pošlete fotodokumentaci.

Dotazy

EHK Koordinátor
Iida Silvo
iida.silvo@aurevia.com

Lhůta pro zaslání výsledků 29. 07. 2025

Vzorky

V balíčku naleznete 2 kontrolní přípravky umělé stolice S001 a S002 každý cca. 2,0 ml, které jsou hotové k použití. Vezměte prosím na vědomí, že pro každý vzorek a zkoušku je potřeba jedna odběrová zkumavka (není součástí dodávky s EHK vzorkem).

Upozornění

Vzorky jsou umělé stolice obsahující materiál lidského původu a mělo by se s nimi zacházet se stejnou mírou opatrnosti jako se vzorkem pacienta schopným přenášet infekční agens. Likvidace materiálu by měla být v souladu s místními postupy pro likvidaci infekčního materiálu.

Vyšetření

F-hHb (kvantitativní stanovení hemoglobinu v stolici doplněno interpretací výsledků **Negat / Pozit**).

Analýza a skladování

Lahvičky obsahují vzorky umělé stolice, které mohou obsahovat lidský hemoglobin (hHb) v pufru obsahujícím <0,1 w/v % azidu sodného.

Analýzu je třeba provést co nejdříve po doručení vzorků. Vzorky skladujte při +2...+8 °C až do použití, pokud nebyla analýza provedena v den doručení. Po otevření lahvičky by měl být vzorek analyzován do 12 hodin, aby se zabránilo kontaminaci a vysušení. Do výsledkového protokolu zaznamenejte datum doručení a analýzy vzorků.

POZNÁMKA: Dříve než budete pokračovat v analýze si pečlivě přečtěte samostatné pokyny pro manipulaci se vzorky v příloženém dokumentu **Návod na přípravu vzorků**. Při analýze vzorků postupujte podle návodu vašeho přístroje.

Při testu iFOB je doporučeno provést **dvě (2) měření** každého vzorku, ale není to podmínka. Provedete-li pouze 1 test, nechte pole druhého výsledku prázdné.

Lahvičky s kontrolními vzorky po analýze nevyhazujte, pevně uzavřete a ponechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu

Výsledky

Na analyzátoru zvolte jednotky **µg/g**. Neposílejte výsledky v **ng/mL**! Pokud nejste si jisti jednotkami, kontaktujte s dotazem OZ dodavatele vašeho přístroje.

Dotazník

V přiloženém dokumentu **Návod na přípravu vzorků** odpovězte na otázky v dotazníku <https://link.webropol.com/survey> nebo si mobilem naskenujte QR kód vpravo dole. Vaše odpovědi a vaše zpětná vazba jsou velmi důležité pro další rozvoj tohoto schématu.

S001



S002



Výsledky

Protokol o zkoušce můžete poslat jenom **online**. Protokoly zaslané emailem nebo poštou nepřijímáme! Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci. Výsledkový protokol můžete otevřít také klikem na obrázek



Lhůta pro zaslání výsledků 29. 07. 2025

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS by Aurevia, který vytvořil Ján Balla. Odpovědnost společnosti Labquality je omezená na původní anglický dopis s pokyny, který je vám odeslán notificačním emailem spolu s ostatními pokyny. Za správnost překladu odpovídá autor: jan.balla@manacon.sk