

Externí hodnocení kvality

**C-reaktivní protein (CRP) POCT,
Cyklus 4, 2025**

Produkt č. 2132
LQ735125041-042/FI

Dotazy
EHK Koordinátor
Kati Venäläinen
kati.venalainen@aurevia.com

Zkontrolujte zásilku při převzetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, okamžitě informujte Labquality a pošlete fotodokumentaci.

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS by Aurevia, který vytvořil Ján Balla. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS by Aurevia je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autor jan.balla@manacon.sk

Lhůta pro zaslání výsledků 09. 09. 2025

Vzorky

Kontrolní vzorky Sample S001 a Sample S002 o objemu 1 ml jsou lidské plasmy. Vzorky jsou připraveny k přímému použití.

S001



S002



V kontrolních materiálech bylo prokázáno, že vzorky jsou HBsAg, HCVAb a HIVAgAb negativní, ale žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

Vyšetření

CRP

Návod k použití

Vzorky jsou připraveny k přímému použití a měly by být analyzovány co nejdříve po příjezdu. Pokud analýza není možná v den doručení, uskladněte kontrolní vzorky v lednici při teplotách + 2 až + 8 ° C. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorky z lednice a nechte je vytemperovat na pokojovou teplotu (cca 1 hod). Vzorek před použitím promíchejte tak, že lahvičku otočíte dnem vzhůru asi 10krát. **Netřepat!** Dále postupujte podle pracovního postupu výrobce vašeho . **Kontrolní vzorky po analýze nevyhazujte, nechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu!**

UPOZORNĚNÍ

Plastová pipeta dodaná Labquality v kontrolní sadě EHK slouží pouze k vytvoření kapky na neadhezivní podložce. **Nepoužívejte tuto pipetu místo odběrové pipety kapiláry vaší diagnostické sady!**

Nastavení přístrojů

Pokud měříte na jakémkoliv typu přístroje **QuikRead** od společnosti **Aidian** (dříve Orion Diagnostica) pracujte obvyklým způsobem a výsledky **vždy** zaznamenejte tak, jak jste je naměřili. **Naměřené výsledky již nenásobte žádným faktorem!**

Pokud měříte na přístroji **NycoCard** při měření kontrol zvolte metodu „**CRP Serum / plasma**“.

Pokud měříte na přístroji **EuroLyser** při měření kontrol zvolte funkci „**Control**“ a typ vzorku „**Serum**“ a pipetujte kontrolní vzorky **pístovou laboratorní pipetou**.

Pokud měříte na přístroji **colibri** pipetujte kontrolní vzorky **pístovou laboratorní pipetou**, ne drátovou smyčkou a postupujte podle [pokynu dodavatele \(zde\)](#).

Pokud měříte na přístrojích **SD Biosensor** (F100, F200) použijte mód **STANDARD TEST**. Po načtení kazetky, zvolte **BACK** a vyberte režim **Serum/Plasma**. Poté aplikujte vzorek a spusťte měření.

Při měření na přístroji **Exdia TRF Plus** kápněte kapku kontrolního roztoku z lahvičky na vnitřní stranu obalu od testovací kazety (kterou použijete k měření) a odběrovou pipetou se této kapky zlehka dotkněte. Dále postupujte jako u patientského měření, typ vzorku zvolte **Plasma/Serum**.

Při měření na přístroji **Easy Reader+** postupujte podle [pokynů dodavatele \(zde\)](#).

ichroma Reader jako jediný typ z řady ichroma přepíná režimy plná krev/ sérum automaticky. Pokud měříte na přístroji **ichroma II** nebo **ichroma M3**, zvolte režim **Serum**.

Na přístroji **LabPad Evolution** nepoužívejte na odběr séra 10 ul kapiláru dodávanou v sadě BioSynex. **Na EHK testování musíte použít laboratorní pipetu o objemu 6 µl.**

Video návody k obsluze klepnete [zde](#) [Video návody](#)

Výsledky

Protokol o zkoušce můžete poslat jenom **online**. Protokoly zaslané emailem nebo poštou nepřijímáme! **Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci.** Nová aplikace výsledkového protokolu je integrována s objednávkovým systémem, což umožňuje automatické vyplnění. Výsledkový protokol můžete otevřít také klikem na obrázek

