

Externí hodnocení kvality

INR, EuroLyser, POCT
Cyklus 1, 2025

Product no. 4337
LQ708325013/AT

Dotazy

EHK Koordinátor
Iida Silvo
iida.silvo@aurevia.com

Zkontrolujte zásilku při převzetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, okamžitě informujte Labquality a pošlete fotodokumentaci.

Lhůta pro zaslání výsledků 30. 05. 2025

Vzorek

Kontrolní vzorek Sample 3 (S003) obsahuje lyofilizovanou plazmu vhodnou pro přístroje EuroLyser.

Upozornění

S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění. V kontrolním materiálu bylo licenčními činidly prokázáno, že neobsahují protilátky proti HBsAg, HCV ani HIVAg, ale žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. Z bezpečnostních důvodů zacházejte s kontrolním vzorkem tak, jako s patientským vzorkem, který je potenciálním přenašečem sérologických onemocnění.

Příprava vzorku

Kontrolní plazmu analyzujte v den doručení. Pokud ji nemůžete analyzovat v den doručení, uskladněte kontrolní plazmu v lednici při teplotách +2 až +8 °C a analyzujte ji co nejdříve. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorek z lednice a nechte ho vytemperovat na pokojovou teplotu a pak analyzujte. Před analýzou vyjměte vzorek z chladničky a nechte ho dosáhnout pokojové teploty. Otevřete lahvičku opatrně, abyste zabránili úniku vysušeného materiálu a **přidejte do ní 1,0 ml destilované vody. Je důležité přenést veškerý objem destilované vody z přiložené lahvičky!** Lahvičku okamžitě uzavřete a nechte ji, chráněnou před světlem, stát asi půl hodiny při pokojové teplotě, dokud je celý materiál zcela rozpuštěn. Lahvičku několikrát zamíchejte, abyste rozpustili jakýkoli materiál, který přilne k zátce. **NETŘEPAT!** Plazma po rozpuštění může být skladována 4 hodiny při pokojové teplotě.

Dále postupujte podle pracovního postupu výrobce vašeho přístroje. **POZOR! Pro měření kontrolního vzorku nezapomeňte nastavit přístroj na režim "Ctrl. Plasma".**

Doporučeno je provést dvě (2) měření vzorku, ale není to podmínka. Provedete-li pouze 1 test, nechte pole druhého výsledku prázdné.

S003



Výsledky

Protokol o zkoušce můžete poslat jenom **online**. Protokoly zaslané emailem nebo poštou nepřijímáme! Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci. Nová aplikace výsledkového protokolu je integrována s objednávkovým systémem, což umožňuje automatické vyplnění. Výsledkový protokol můžete otevřít také klikem na obrázek



Lhůta pro zaslání výsledků 30. 05. 2025

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS by Aurevia, který vytvořil Ján Balla. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS by Aurevia je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autor jan.balla@manacon.sk

