

INR, CoaguChek, i-STAT and Xprecia, POCT Cyklus 2, 2025

Product no. 4335
LQ708325021/SE

Dotazy
EHK Koordinátor
Iida Silvo
iida.silvo@aurevia.com

Zkontrolujte zásilku při převzetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, okamžitě informujte Labquality a pošlete fotodokumentaci.

Lhůta pro zaslání výsledků 11. 11. 2025

Vzorek

Kontrolní vzorek Sample 1 (S001) o objemu 0,3 ml obsahuje plazmu připravenou k použití.



Upozornění

S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění. V kontrolním materiálu bylo licenčními činidly prokázáno, že neobsahují protilátky proti HBsAg, HCV ani HIVAg, ale žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. Z bezpečnostních důvodů zacházejte s kontrolním vzorkem tak, jako s patientským vzorkem, který je potenciálním přenašečem sérologických onemocnění.

Postup v zacházení se vzorkem

Obrázkové i textové postupy pro přístroje CoaguChek a Xprecia Stride jsou přiloženy.

Návod k použití

Vzorek je připraven k přímému použití. Kontrolní plazmu **analyzujte** v den doručení. Pokud nemůžete analyzovat v den doručení, uskladněte kontrolní plazmu v lednici při teplotách +2 až +8 °C a **analyzujte ji co nejdříve**. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorek z lednice a nechte jej vytemperovat na pokojovou teplotu a pak analyzujte. Provedte pouze 1 test a v protokolu nechte pole druhého výsledku prázdné.

Režim měření

Roche CoaguChek

Na přístroji **CoaguChek** měřte kontrolní vzorek stejným způsobem, jako patientský vzorek (tj. v režimu pro pacienty).

Pracovní postup nemodifikujte!

Na přístrojích CoaguChek postačuje provést 1 test. Provedete-li pouze 1 test, nechte v protokolu pole druhého výsledku prázdné.

Siemens Xprecia Stride/Prime

Na přístroji **Xprecia Stride** měřte **kontrolní vzorek v režimu pro kontroly** (ne jako patientský vzorek!). Když vás přístroj vyzve k zadání kódu, prosím, naskenujte čárový kód níže.



Hlášení výsledků

Protokol o zkoušce můžete poslat jenom **online**. Protokoly zaslané emailem nebo poštou nepřijímáme!

Postup přihlášení do protokolu:

1. Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> nebo na obrázek níže. Otevře se vám "**Přihlášení přes odkaz v emailu**". Napište svůj přihlašovací email a klikněte na "Poslat odkaz". Nepoužívejte žádný jiný email (privátní)!
 2. Na váš email vám přijde zpráva, ve které bude nový odkaz. Klikněte na něj.
 3. Otevře se vám váš automatický protokol. Zvolte cyklus.
 4. Klikněte na položku Vyberte pracoviště. Ověřte si vaše údaje. Pokud je potřeba něco v adrese změnit, opravte.
 5. Dále postupujte podle pokynů samotné aplikace.
- Protokol o zkoušce můžete otevřít také klikem na následující obrázek.



Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS by Aurevia, který vytvořil Ján Balla. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS by Aurevia je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autor jan.balla@manacon.sk