

Natriuretické peptidy 1, typ B, NT-proBNP Cyklus 2, 2025

Produkt č. 2690
LQ738125021-022/US

Dotazy

EHK Koordinátor
Satu Eklund
satu.eklund@aurevia.com

Zkontrolujte zásilku při převzetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, okamžitě nás informujte a pošlete fotodokumentaci.

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS by Aurevia, který vytvořil Ján Balla. Odpovědnost společnosti Labquality je omezená na původní anglický dopis s pokyny, který je vám odeslán notifikačním emailem spolu s ostatními pokyny. Za správnost překladu odpovídá autor jan.balla@manacon.sk

Lhůta pro zaslání výsledků 16. 05. 2025

Instrukce v elektronické podobě jsou dostupné zde: <https://www.manacon.cz/vybrat-pracovni-navody-a-vysledkove-protokoly-pracovni-navody-a-vysledkove-protokoly/natriureticke-peptidy-bnp-a-nt-probnp/>

Vzorky

Dva komerční tekuté přípravky lidského původu S001 a S002, každý 3 ml. Obsahují konzervační látky a stabilizátory.

Upozornění


V kontrolních materiálech bylo prokázáno, že vzorky jsou HBsAg, HCVAb a HIVAgAb negativní. Žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí proto zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

Vyšetření

NT-proBNP

Návod k použití

Vzorky jsou připraveny k použití. Nejlépe je analyzovat v den přijetí. Pokud je vzorek při dodání zmrazený a chcete jej okamžitě analyzovat, nechte jej asi hodinu rozmrazit při pokojové teplotě. Poté vzorek před analýzou několik minut míchejte. Pokud analýza není možná v den doručení vzorků, uskladněte kontrolní vzorky v lednici při teplotách + 2 až + 8 ° C a analyzujte je co nejdříve. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorky z lednice a nechte je zvolna vytemperovat na pokojovou teplotu. Krev před analýzou promíchejte jemným otáčením lahvičky. Držte nádobku se vzorkem mezi palcem a ukazováčkem a lahvičku 10 x obraťte dnem vzhůru a nazpět. **Netřepat!** Poté ukazováčkem poklepejte na víčko nádoby, aby tekutina zachycená na uzávěru skla na dno. Otevřete nádobku a dále postupujte podle pracovního návodu výrobce vašeho přístroje.

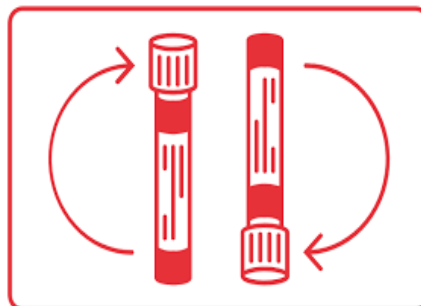

Upozorňujeme, že kontrolní vzorky jsou pooly lidských sér. Některé přístroje vyžadují k měření kontrolních vzorků EHK nastavení **měřicího režimu „Plasma/ Serum“**. Pro víc informací pro váš přístroj kontaktujte OZ dodavatele vašeho přístroje. Pracovní postup pro měření kontrolních vzorku na Exdia TRF naleznete [ZDE](#).

Kontrolní vzorky po analýze nevyhazujte, nechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu!

Hlášení výsledků

Protokol o zkoušce můžete poslat jenom **online**. Protokoly zaslané emailem nebo poštou nepřijímáme! Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle interaktivních instrukcí, které vám nabízí aplikace. Nová aplikace výsledkového protokolu je integrována s objednávkovým systémem. Pokud ve vaší adrese došlo ke změnám, upravte je ve výsledkovém protokolu. Adresa, kterou uvedete ve výsledkovém protokolu, bude použita na vašem certifikátu/ osvědčení.

Protokol o zkoušce můžete otevřít také klikem na obrázek



Čárové kódy vzorků pro automatické čtečky (pokud je používáte ve svém zařízení).

S001



S002

