

Návod k použití plastových pipet



1. Pro každý vzorek je jednotlivě balená pipeta o objemu 0,1 ml.



2. Dodržujte prosím pokyny pro skladování a použití vzorků. Před analýzou nechte vzorky dosáhnout pokojové teploty. Před použitím vzorek promíchejte otočením lahvičky dnem vzhůru asi 10krát.



3. Otevřete lahvičku se vzorkem a přeneste malé množství vzorku na hydrofobní povrch. Můžete použít vnitřek plastového úložného sáčku (Ziploc), kde byla zabalena pipeta.

Upozornění.

Tato pipeta slouží pouze k vytvoření kapky na neadhezivní podložce. Nepoužívejte tuto pipetu místo odběrové pipety/ kapiláry vaší diagnostické sady!



4. Odběrovou pipetou/ kapilárou vaší testovací sady (obrázek je ilustrační) se dotknete povrchu kapky. Nechte sérum volně nasát do kapiláry. Neznečistěte přitom držák kapiláry.

5. Dále postupujte podle návodu vaší testovací sady. Pro další vzorek použijte nepoužitou pipetu. Vzorky S001 a S002 spolu nemíchejte.