

Fekální hemoglobin (iFOB/FIT) 2, 2025

Návod na přípravu vzorků

Poznámka: Vzorky musí být skladovány při +2 až +8 °C, pokud nejsou analyzovány v den příjezdu.**Krok 1**

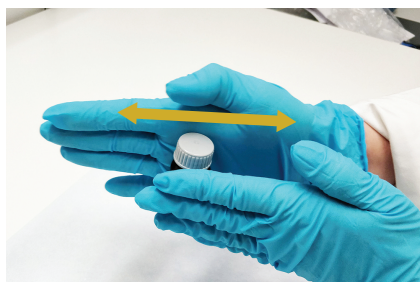
Ohřejte vzorky na pokojovou teplotu tak, že je necháte jednu hodinu stát na stole.



60

Krok 2

Vzorek promíchejte intenzivním třepáním lahvičkou do stran a válením mezi rukama po dobu alespoň 1 minuty, dokud není dosaženo úplné homogenizace. Poté můžete poklepáním lahvičky o stůl odstranit materiál vzorku z uzavěru.

**Krok 3**

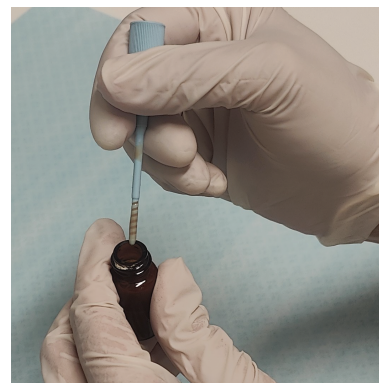
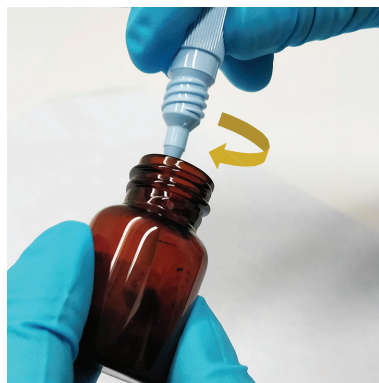
Dbejte na správné promíchání. Pokud se na povrchu objeví voda, pokračujte v třepání po dobu 30 sekund, dokud vzorek není zcela homogenní. V případě potřeby můžete k promíchání vzorku použít čistou tyčinku nebo podobný předmět.



Poznámka: Vzorek EHK nesmí být přidán přímo do vašeho analyzátoru! Musí se s ním zacházet jako se stolicí pacienta a musí se odebrat do zkumavky pro odběr vzorku podle pokynů výrobce vašeho testu.

Krok 4

Odeberte vzorek pomocí aplikační tyčinky určené pro váš test. Tyčinku několikrát projedte vzorkem, abyste se ujistili, že všechny drážky a zářezy jsou dostatečně vyplněny vzorkem. **Pozor! Na tyčince by neměl zůstat žádný přebytečný vzorek, zejména na špičce!** Opatrně odstraňte přebytečnou stolicí z hrotu pomocí kousku papíru a dbejte na to, abyste neodstranili materiál i ze zářezů tyčinky! Přebytečný vzorek by mohl vést k chybám v analýze. Pokud zařízení spustí chybový alarm, opakujte analýzu s menším objemem vzorku.

**Krok 5**

Pokračujte v procesu podle pokynů výrobce testu za použití stejného postupu jako u vzorku pacienta. Nezapomeňte na všechny kroky pokynů výrobce vzorku jako je protřepání, případná inkubace a převrácení a proveďte měření podle návodu jako u vzorku pacienta.

Step 6

Nahlaste prosím své výsledky a odpovězte na otázky v dotazníku prostřednictvím odkazu <https://link.webropol.com/survey>. Všechny části jsou povinné a prosíme vás, abyste nahlásili následující:

- Datum přijetí vzorku a měření
- Datum měření
- Název odběrové soupravy
- Název testovací soupravy a analyzátoru
- Výsledek (µg/g)
- Interpretaci výsledků (negative/ pozitivní)
- Otázky týkající se manipulace se vzorky



Jakmile je lahvička se vzorkem otevřena, vzorek umělé stolice může být analyzován několikrát, ale neměl by být skladován a používán jiný den kvůli riziku kontaminace a vysychání. Vzorek by měl být analyzován do 12 hodin po otevření.

Poznámka: Výsledky by měly být uvedeny v µg/g.