


Manipulace se vzorkem pro microINR

Krok 1

Plastovou pipetkou přeneste veškerý objem ředidla do lahvičky s krví.

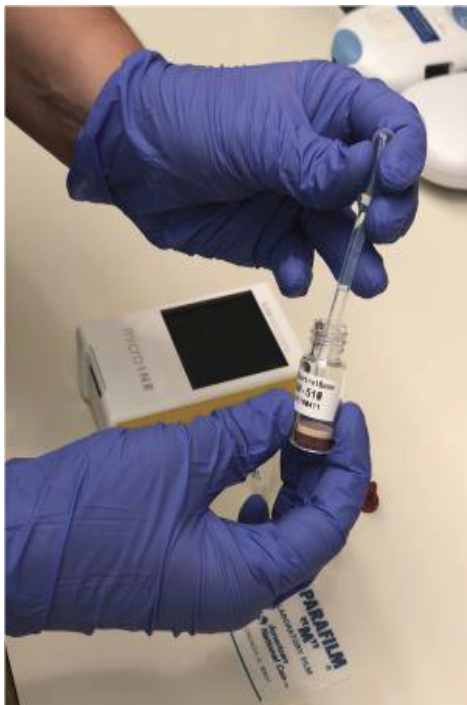

Krok 2

Lahvičku s krví 30 sekund intenzivně potřepáváte.



Krok 3

Rozpuštěnou krev dále promíchejte pipetou alespoň 10krát tak, že stlačením pipety natáhnete krev do pipety a zpětně ji vypustíte do lahvičky.

Snažte se vyhnout bublinám!



Krok 4

Okamžitě aplikujte kapku kontrolní krve na parafilm nebo blistr a potom ihned na chip. **Vyvarujte se bublin!**



Krok 5

Vhodný způsob měření kontrolních vzorků je nasávání vzorku do čipu **ve svislé poloze**.

