


Pracovní postup a zacházení s kontrolními vzorky LabPad INR

KROK 1

Spustíte proces na LabPad® INR: „Nastavení“ (Settings), „Měření“ (Measurements) a „Kontrola kvality“ (QC).

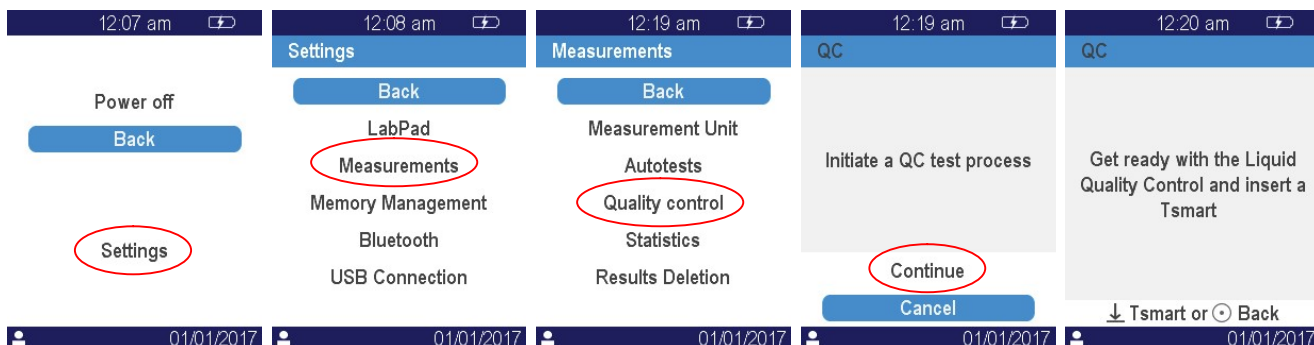

KROK 2

Vložte mikrokvetu Tsmart® INR a připravte vzorek.

Vložte injekční lahvičku do ochranného pouzdra. Klepnutím na ni se skleněná ampule usadí na dně lahvičky.



UPOZORNĚNÍ!

Před rekonstitucí kontrolního roztoku vyčkejte, až se zobrazí ikona kapky krve.



KROK 3



3a. Rozdrťte skleněnou ampulku na 3 místech. **Další kroky proveďte co nejrychleji, abyste se vyhnuli koagulaci v lahvičce.**



3b. Důkladně protřepejte, aby se zajistila homogenita 5 až 10 sekund. Převrácení ~ 5 krát špičkou kapátka dolů.



3c. Odstraňte dvě první kapky.



3d. Kápnete třetí kapku na mikrokvetu.

