

Externí hodnocení kvality

**Streptococcus pyogenes (Group A),
Detekce antigenu ve pharyngeálním vzorku**

Cyklus 1, 2026

Produkt č. 5595
LQ761326011-013/CA

Zásilku zkontrolujte ihned při její přijetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, informujte nás o tom emailem.

Dotazy
EHK Koordinátor
Marsa Järvenpää
marsa.jarvenpaa@labquality.com

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS, který vytvořila Mária Otiěpková. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autor maria.otiepkova@manacon.cz

Lhůta pro zaslání výsledků 24.3.2026

Vzorky

Součástí jsou tři simulované výtěrové vzorky: S001, S002 a S003.

Čárové kódy vzorků pro automatické čtečky (pokud je používáte ve svém zařízení).



S001



S002



S003

Vyšetření

- *Streptococcus pyogenes* (skupina A) – detekce antigenu (Strep A Ag)

Upozornění

Kontrolní vzorky kvality je nutné zpracovávat se stejnou opatrností jako vzorky pacientů, tedy jako potenciální zdroj závažných infekčních onemocnění. Podle výrobce vzorky neobsahují životaschopné mikroorganismy. Žádná známá testovací metoda však nemůže poskytnout úplnou záruku, že tyto nebo jiné infekční choroby nemohou být přeneseny. Není určeno pro použití u pacientů.


Skladování a použití

Po obdržení vzorků je skladujte při teplotě +2 až +30 °C.

Před zahájením testování si přečtěte pokyny k manipulaci se vzorky. Vzorky se analyzují a vykazují stejně jako vzorky pacientů.

Manipulace se vzorky

1. Otevřete fóliový obal. Vyměňte tampon tak, abyste se nedotkli jeho špičky.
2. Vložte tampon do eluční zkumavky testu stejně jako při práci se vzorkem pacienta. V případě potřeby přidejte reagentie. Postupujte vždy podle pokynů výrobce testu.
3. Opatrně tampon promíchejte v kapalině, aby se uvolnilo co nejvíce materiálu. Malé bubliny lze ignorovat.
4. Analýzu proveďte podle pokynů výrobce testu

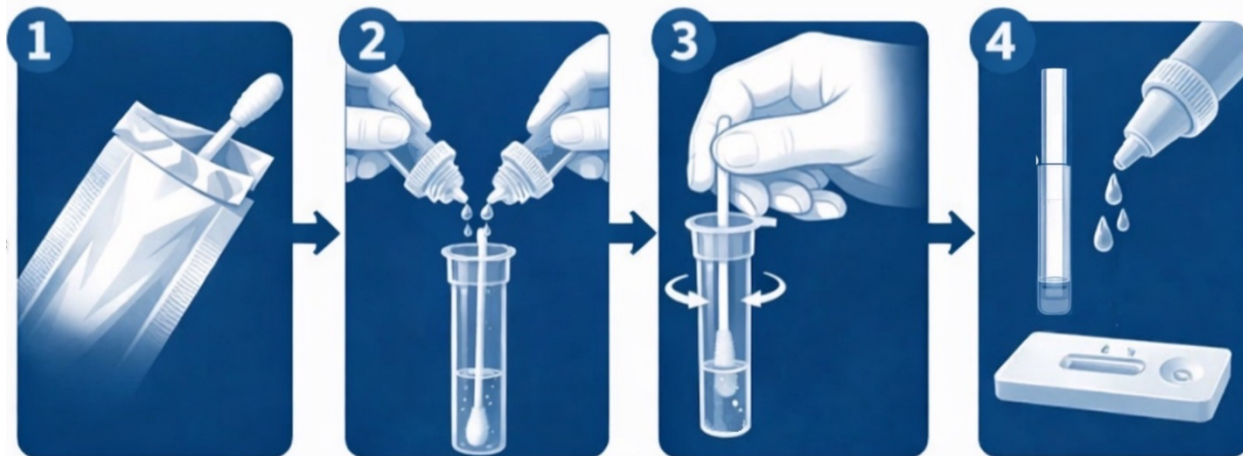

Nahlášení výsledků

Pro každý přístroj vyplňte samostatný výsledkový protokol. Vždy zaznamenávejte výsledky pro celou sadu vzorků (001, 002 a 003), pokud některý vzorek nemá výsledek, obdrží skóre 0 bodů. Všechny oznámené výsledky budou bodovány.

Protokol o zkoušce můžete poslat jenom online. Protokoly zasláné emailem nebo poštou nepřijímáme!

Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci. Nová aplikace výsledkového protokolu je integrována s objednávkovým systémem, což umožňuje automatické vyplnění.