

## Externí hodnocení kvality

**Streptococcus pyogenes (skupina A),  
Detekce antigenu ve pharyngeálním vzorku  
Cyklus 2, 2026**

**Produkt č. 5595**  
LQ761326021-023/CA

**Dotazy**

EHK Koordinátor  
Marsa Järvenpää

[marsa.jarvenpaa@labquality.com](mailto:marsa.jarvenpaa@labquality.com)

Zásilku zkontrolujte ihned při její přijetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, informujte nás o tom emailem.

*Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS, který vytvořila Mária Otiepková. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autor [maria.otiepkova@manacon.cz](mailto:maria.otiepkova@manacon.cz)*

---

**Lhůta pro zaslání výsledků 5.6.2026**

---

**Vzorky**

Součástí zásilky jsou tři simulované výtěrové vzorky S001, S002 a S003

S001



S002



S003

**Upozornění**

Kontrolní vzorky kvality je nutné zpracovávat se stejnou opatrností jako vzorky pacientů, tedy jako potenciální zdroj závažných infekčních onemocnění. Podle výrobce vzorky neobsahují životaschopné mikroorganismy. Žádná známá testovací metoda však nemůže poskytnout úplnou záruku, že tyto nebo jiné infekční choroby nemohou být přeneseny. Není určeno pro použití u pacientů.

**Vyšetření**

- *Streptococcus pyogenes* (skupina A), průkaz antigenu (Strep A Ag)
- *Streptococcus pyogenes* (skupina A), průkaz nukleové kyseliny (Strep A NAT)

**Skladování a použití**

Po obdržení vzorků je skladujte při teplotě +2 až +30 °C.

Před zahájením testování si přečtěte pokyny k manipulaci se vzorky. Vzorky se analyzují a vykazují stejně jako vzorky pacientů.

**Manipulace se vzorky**

1. Otevřete fóliový obal. Vyjměte tampón z obalu a nedotýkejte se jeho špičky.
2. Vložte tampón do extrakční zkumavky vašeho testu stejným způsobem, jako byste zpracovávali vzorek odebraný pacientovi. Postupujte vždy podle pokynů výrobce testu.

3. Opatrně promíchejte tampón v kapalině, aby se uvolnilo co nejvíce materiálu ze vzorku. Pokud se v tekutině objeví malé bublinky, lze je ignorovat. Nemají vliv na úspěšnost testu. **Je důležité dodržet čas inkubace.**
4. Provedte analýzu vzorku podle pokynů výrobce testu.

Stručný návod QuikRead go Strep A

<https://www.manacon.cz/wp-content/uploads/QuikRead-go-Strep-A.pdf>

Stručný návod QuikRead go Exdia TRF Plus

<https://www.manacon.cz/wp-content/uploads/strep-A.pdf>

### Odkaz na video návody

<https://www.manacon.cz/vybrat-pracovni-navody-a-vysledkove-protokoly-pracovni-navody-a-vysledkove-protokoly/video-navody/>

### Nahlášení výsledků

Vždy zaznamenávejte výsledky pro celou sadu vzorků (001, 002 a 003). Všechny oznámené výsledky budou hodnoceny.

**Protokol o zkoušce** můžete poslat jenom online. Protokoly zaslané emailem nebo poštou nepřijímáme!

**Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci.** Nová aplikace výsledkového protokolu je integrována s objednávkovým systémem, což umožňuje automatické vyplnění.