

Externí hodnocení kvality***Streptococcus pyogenes (skupina A),
Detekce antigenu ve faryngeálním vzorku
Cyklus 3, 2026*****Produkt č. 5595**
LQ761326031-033/CA

Zásilku zkontrolujte ihned při její přijetí,
pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené
vzorky, informujte nás o tom emailem.

Dotazy

EHK Koordinátor
Marsa Järvenpää
marsa.jarvenpaa@labquality.com

*Toto je překlad instrukcí společnosti
Labquality EQAS, který vytvořila Mária
Otiepková. Odpovědnost společnosti
Labquality EQAS je omezena na původní
anglický dopis s pokyny, který vám můžeme
zaslat na vyžádání. Za správnost překladu
odpovídá autor maria.otiepkova@manacon.cz*

Lhůta pro zaslání výsledků 23.9.2026

Vzorky

Součástí zásilky jsou tři simulované výtěrové vzorky S001, S002 a S003.

S001



S002



S003

**Upozornění**

Kontrolní vzorky kvality je nutné zpracovávat se stejnou opatrností jako vzorky pacientů, tedy jako potenciální zdroj závažných infekčních onemocnění. Podle výrobce vzorky neobsahují životaschopné mikroorganismy. Žádná známá testovací metoda však nemůže poskytnout úplnou jistotu, že nedojde k přenosu těchto nebo jiných infekčních onemocnění. Není určeno pro použití u pacientů.

Vyšetření

- *Streptococcus pyogenes* (skupina A), průkaz antigenu (Strep A Ag)
- *Streptococcus pyogenes* (skupina A), průkaz nukleové kyseliny (Strep A NAT)

Skladování a použití

Po obdržení vzorků je skladujte při teplotě +2 až +30 °C.

Před zahájením testování si přečtěte pokyny k manipulaci se vzorky. Vzorky se analyzují a vykazují stejně jako vzorky pacientů.

Manipulace se vzorky

1. Otevřete fóliový obal. Vyjměte tampón z obalu a nedotýkejte se jeho špičky.
2. Vložte tampón do zkumavky s elučním pufrem vašeho testu stejným způsobem, jako byste zpracovávali vzorek odebraný pacientovi. Postupujte vždy podle pokynů výrobce testu.
3. Opatrně promíchejte krouživým pohybem tampón v kapalině, aby se uvolnilo co nejvíce materiálu ze vzorku. Pokud se v tekutině objeví malé bublinky, lze je ignorovat. Nemají vliv na úspěšnost testu. **Je důležité dodržet čas inkubace.**
4. Proveďte analýzu vzorku podle pokynů výrobce testu.

Stručný návod QuikRead go Strep A

<https://www.manacon.cz/wp-content/uploads/QuikRead-go-Strep-A.pdf>

Stručný návod Exdia TRF Plus

<https://www.manacon.cz/wp-content/uploads/strep-A.pdf>

Odkaz na video návody

<https://www.manacon.cz/vybrat-pracovni-navody-a-vysledkove-protokoly-pracovni-navody-a-vysledkove-protokoly/video-navody/>

Nahlášení výsledků

Jedna sada vzorků (001, 002 a 003) je určena pro jeden přístroj. Všechny oznámené výsledky budou hodnoceny.

Výsledkový protokol přijímáme výhradně online. Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci.