

Externí hodnocení kvality

**Troponin I and troponin T, POCT,
Cyklus 3, 2025**

Produkt č. 2530
LQ738325031-032/DE

Dotazy
EHK Koordinátor
Päivi Ranta
paivi.ranta@aurevia.com

Zkontrolujte zásilku při převzetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, okamžitě nás informujte a pošlete fotodokumentaci.

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS by Aurevia, který vytvořil Ján Balla. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS by Aurevia je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autor jan.balla@manacon.sk

Lhůta pro zaslání výsledků 24. 07. 2025

Vzorky

Kontrolní vzorky Sample S001 a Sample S002 o objemu 1 ml jsou lidské směsná séra. Vzorky jsou připraveny k přímému použití.

Upozornění

V kontrolních materiálech bylo prokázáno, že vzorky jsou HBsAg, HCVAb a HIVAgAb negativní, ale žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

Vyšetření

Troponin I. Troponin T


Návod k použití

Kontrolní séra doporučujeme analyzovat v den přijetí. Pokud to ale není možné, uskladněte kontrolní vzorky v lednici při teplotách + 2 až + 8 ° C a analyzujte je **co nejdříve**. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorky z lednice a nechte je vytemperovat na pokojovou teplotu (cca 1 hod).

Pak lahvičky **jemným** kroužením pečlivě **promíchejte**. Držte nádobku se vzorkem mezi palcem a ukazováčkem a otočte lahvičku 10 x dnem vzhůru a nazpět. **Zabraňte tvorbě pěny. Netřepat!** Poté ukazováčkem poklepejte na víčko nádoby, aby tekutina zachycená na uzávěru skla na dno. Otevřete nádobku a dále postupujte podle pracovního návodu vašeho přístroje.

Kontrolní vzorky po analýze nevyhazujte, nechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu! Vzorky nesmí být zmrazeny.

*Dále postupujte podle pracovního postupu výrobce vašeho přístroje. **Upozorňujeme**, že kontrolní vzorky jsou pooly lidských sér a při měření EHK vyžadují některé přístroje (např. Exdia) změnu nastavení příslušného měřicího režimu na obrazovce z Plná krev na **Plazma/ Serum**. Pro více informací o nastavení doporučujeme kontaktovat OZ dodavatele vašeho přístroje.*

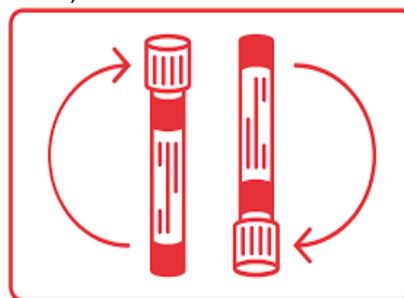

Hlášení výsledků

Protokol o zkoušce můžete poslat jenom **online**. Protokoly zaslané emailem nebo poštou nepřijímáme! Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle interaktivních instrukcí, které vám nabízí aplikace. Nová aplikace výsledkového protokolu je integrována s objednávkovým systémem. Pokud ve vaší adrese došlo ke změnám, upravte je ve výsledkovém protokolu. Adresa, kterou uvedete ve výsledkovém protokolu, bude použita na vašem certifikátu/ osvědčení.

Protokol o zkoušce můžete otevřít také klikem na obrázek



Čárové kódy vzorků pro automatické čtečky (pokud je používáte ve svém zařízení).

S001



S002

