

Externí hodnocení kvality

Troponin I a troponin T, POCT

Cyklus 4, 2026

Produkt č. 2530

LQ738326041-042/DE

Dotazy

EHK Koordinátor Päivi Ranta

paivi.ranta@labquality.com

Zásilku zkontrolujte ihned při její přijetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, informujte nás o tom emailem.

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS, který vytvořila Mária Otiepková. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání.

Za správnost překladu odpovídá autor maria.otiepkova@manacon.cz

Lhůta pro zaslání výsledků 05. 10. 2026

Vzorky

V zásilce naleznete 2 vzorky lidského séra S001 a S002, každý o objemu 1 ml.

S001



S002



Upozornění

Testování kontrolních materiálů prokázalo, že vzorky jsou negativní na HBsAg, HCVAb a HIVAgAb, ale žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tato nebo jiná infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

Vyšetření


Troponin I kvalitativně, Troponin I kvantitativně
Troponin T kvalitativně, Troponin T kvantitativně

Skladování a použití

Po obdržení vzorků je uchovávejte při +2 až +8 °C a analyzujte co nejdříve. Vzorky jsou stabilní do ukončení kola. Kontrolní vzorky po analýze nevyhazujte, nechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu! Vzorky nesmí být zmrazeny.

Před analýzou nechte vzorky temperovat na pokojovou teplotu a obsah zkumavky promíchejte několikanásobným převrácením.

Zkumavku držte mezi palcem a ukazováčkem a převratte ji alespoň 10 x, aby se promíchala kapalina u dna i na povrchu. Zabraňte tvorbě pěny. **Netřepat!** Důkladné promíchání je velmi důležité pro spolehlivý výsledek. Otevřete nádobku a dále postupujte podle pracovního návodu vašeho přístroje.

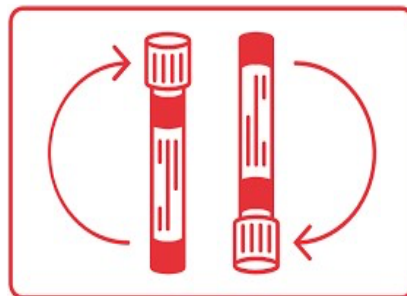

Pracovní postup pro měření kontrolních vzorků na Exdia TRF

- Vzorek vytemperujte a důkladně promíchejte.
- Připravte si testovací kazetu a pipetu.
- Nasajte vzorek do celé tyčinky a přeneste celý objem do kazety.
- Ujistěte se, že ve spodní (odpadní) části pipety zůstala definovaná vzduchová bublina.
- Ihned po nanesení vložte kazetu do analyzátoru.
- Na displeji přepněte na režim **Plazma / Sérum**.
- Zaznamenejte výsledek.
- Po skončení nezapomeňte přístroj přepnout zpět na plnou krev pro měření pacientů.

Pracovní postup pro měření kontrolních vzorků na AFIAS

- Vložte kazetu do držáku.
- Zasuňte špičku do příslušného otvoru v kazetě.
- Na přístroji zvolte „Všeobecný režim (General mode)“ nebo „Analýzy“.
- Pipetou odeberte 100 µL vzorku (sérum/plazma) a dávkujte do vzorkovací jamky v kazetě.
- Na displeji vyberte typ vzorku **Sérum/Plazma**.
- Stiskněte tlačítko „Start“.

Pracovní postup pro měření kontrolních vzorků na Cobas h232

- Vzorek vytemperujte a důkladně promíchejte.
- Připravte si testovací kazetu a pipetu.
- Odeberte vzorek po černou rysku na pipetě a celý objem kápněte na vyznačené místo na kazetě (stejně jako u pacienta).
- Spustěte měření.

Pracovní postup pro měření kontrolních vzorků na SD BIOSENSOR

- Vzorek vytemperujte a důkladně promíchejte.
- Ze soupravy STANDARD F TnI FIA vyjměte testovací kazetu a vložte ji do přístroje v režimu „Test“.
- Na displeji postupně zvolte: „Bez ID“ -> „Vybrat vzorek“ -> režim **Plazma/Sérum**.
- Otevřete zkumavku s pufrem. Pipetou nasajte 100 µL tekutiny z lahvičky (až po černou rysku).
- Vytlačte obsah pipety do zkumavky s pufrem a stejnou pipetou směs 3× promíchejte.
- Nasajte 100 µL promíchané směsi (po černou rysku), aplikujte do okénka na kazetě a zvolte „START“.
- Po skončení nezapomeňte přístroj přepnout zpět na plnou krev pro měření pacientů.

Výsledkový protokol přijímáme výhradně online. Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci.