


## Upozornění pro uživatele přístroje EXDIA TRF+

Prohlédněte si správný postup pipetování na následujícím videu (od 25. sekundy)


<https://www.youtube.com/watch?v=q9RKYBTBPNk&t=3s>

### Naplnění pipety

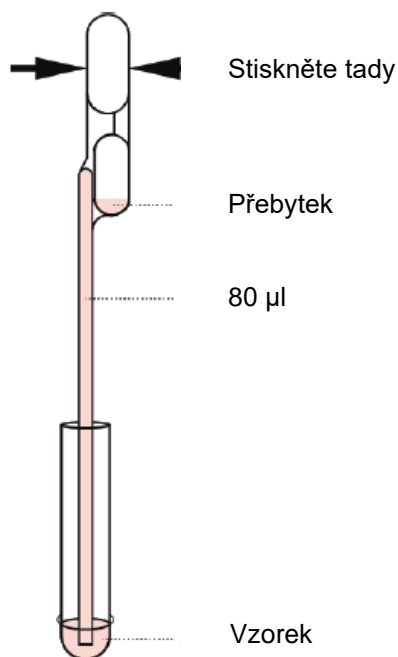

Chcete-li vzorek nasát do pipety, nejdříve pevně zmáčkněte horní balónek a vložte špičku pipety do vzorku a balónek pomalu a plynule uvolněte tak, aby kapalina zaplnila celou špičku (válec) pipety. Ujistěte se, že jste zcela naplnili špičku (válec) pipety a ujistěte se, že v malém balóнку pipety je jen zbytkový vzorek a že ve válci pipety **nejsou žádné bubliny**.


### Dávkování

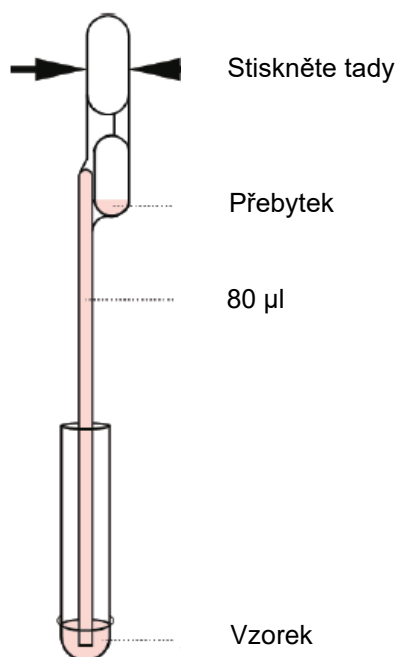

Vyjměte pipetu z kontrolního vzorku a pevným stlačením horního balóнку vytlačte celý objem kapaliny z válce pipety do jamky testovací kazety. Měl by se uvolnit celý objem kapaliny 80 µl. Pokud ve spodním balóнку zůstane malé množství vzorku, je to v pořádku. **Spodní balónek nikdy nestlačujte.**


### **Nedostatečně naplněná pipeta**

Pipeta nemá dostatek vzorku. Zlikvidujte a použijte novou pipetu, abyste zajistili správný objem 80  $\mu$ l.

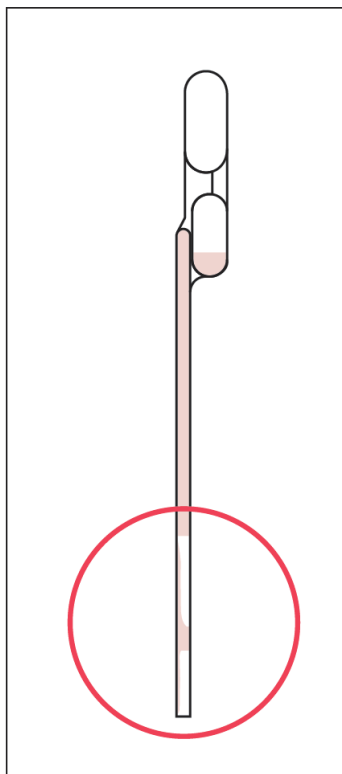


### **Přeplněná pipeta**

Pipeta má příliš mnoho vzorku. Zlikvidujte a použijte novou pipetu, abyste zajistili správný objem 80  $\mu$ l.

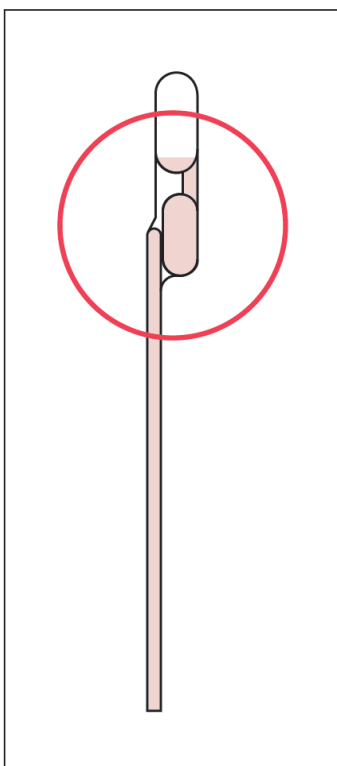

### Správně naplněná pipeta

Pipeta má správné množství vzorku. Vytlačte celý objem kapaliny z válce pipety do jamky testovací kazety.

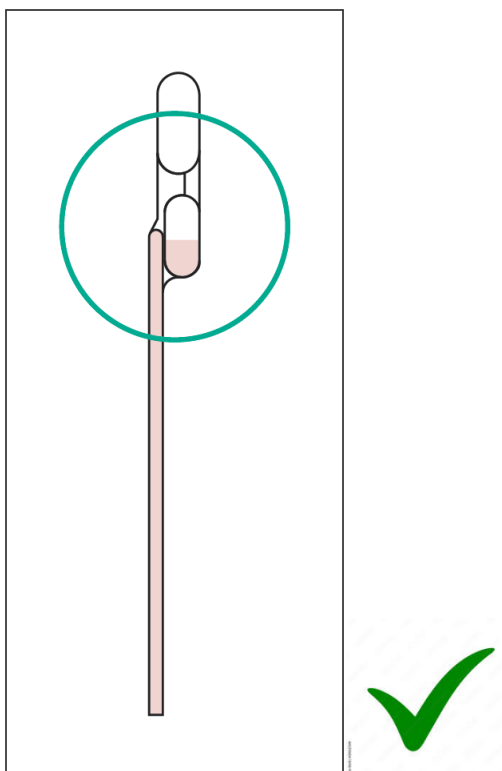

### **POZOR!**

Ověřte, zda je mezi vzorkem v dolním balónku a válcem pipety **vzduchová bublina**, jak je znázorněno na obrázku níže. Pokud není žádná vzduchová bublina, poklepejte na pipetu, aby kapka spadla do balónku. V opačném případě je pravděpodobné, že nebude aplikováno správné množství tekutiny.

