

Externí hodnocení kvality

## Okultní krvácení ve stolici – kvantitativní stanovení

### Cyklus 2, 2026

**Produkt č. 2747, 2749**

LQ747726021-022/DE

**Dotazy**

EHK Koordinátor

Iida Silvo

[iida.silvo@labquality.com](mailto:iida.silvo@labquality.com)

Zásilku zkontrolujte ihned při její přijetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, informujte nás o tom emailem.

*Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS, který vytvořila Mária Otiepková. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autor [maria.otiepkova@manacon.cz](mailto:maria.otiepkova@manacon.cz)*

---

**Lhůta pro zaslání výsledků 3.7.2026**

---

#### Vzorky

Součástí zásilky jsou 2 připravené umělé vzorky stolice S001 a S002 v pufru, každý o objemu přibližně 2,0ml, obsahující <0,1% azidu sodného (Na-azid). Pro každý EHK vzorek je potřeba jedna odběrová zkumavka specifická pro daný test (není součástí balení)

S001



S002



#### Upozornění

Vzorky obsahují materiál lidského původu, který byl s negativním výsledkem testován na protilátky HIV1&2 a HCV a antigen HBsAg. Přesto by se s nimi mělo zacházet jako se vzorky schopnými přenášet infekční agens. Likvidace materiálu má být v souladu s národními předpisy.

#### Vyšetření

F -hHb (kvantitativně)

#### Skladování a použití

Analýzu je nutné provést ihned po doručení vzorků. Pokud to není možné, uchovávejte vzorky před použitím při teplotě +2 až +8 °C.

**Dříve než budete pokračovat v analýze si pečlivě přečtěte samostatné pokyny pro manipulaci se vzorky v příloženém dokumentu Návod na přípravu vzorků. Při analýze vzorků postupujte podle návodu vašeho přístroje.**

Po otevření lahvičky by měl být vzorek analyzován do 12 hodin, aby se zabránilo kontaminaci a vysychání.

V případě vyšetření iFOB lze provést druhé měření, toto měření však není povinné.

Na analyzátoru zvolte jednotky **µg/g**.

**Neposílejte výsledky v ng/mL!** Pokud nejste si jisti jednotkami, kontaktujte s dotazem OZ dodavatele vašeho přístroje.

## Nahlášení výsledků

Protokol o zkoušce můžete poslat jenom online. Protokoly zaslané emailem nebo poštou nepřijímáme! Klikněte na odkaz <https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/> a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci. Nová aplikace výsledkového protokolu je integrována s objednávkovým systémem, což umožňuje automatické vyplnění.